

# INSTRUKCJA UŻYCIA

BAMBIKOWE LOGOPRZYGODY

MD

REF

199258



Program do terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym –  
stymuluje rozwój mowy i języka dziecka

**Autor programu:** Dr n. zdr. Marzena Walkowiak – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog -terapeuta, terapeuta miodfunkcyjny, specjalista diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, provider metod terapii słuchowych: Neuroflow ATS, Johansena, Go Brain

KLUCZ LICENCJI

KOD UMIESZCZONY NA OPAKOWANIU WYROBU

OSTATNIA AKTUALIZACJA	28.03.2022
WERSJA	Ver. 02



UWAGA

*Przed pierwszym użyciem programu przeczytaj dokładnie instrukcję użytkownika*

Strona 1 z 4

moje  
bambino®



Moje Bambino Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź  
tel.: 42 630 01 30, 630 01 70, 630 01 34, 630 03 05  
faks: 42 630 04 80, infolinia: 801 577 544  
biuro@mojebambino.pl, [www.mojebambino.pl](http://www.mojebambino.pl)







## WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU

- §1. Umowa jest zawierana pomiędzy Moje Bambino Sp. z o.o., zwaną dalej „Moje Bambino”, a użytkownikiem programu i obowiązuje bezterminowo na terenie Polski.
- §2. Użytkownik akceptując warunki niniejszej licencji oświadcza, iż nabył program w sposób legalny.
- §3. Moje Bambino jako wydawca programu przyznaje niniejszemu użytkownikowi, licencję na niewyłączne użytkowanie programu na jednym stanowisku. Użytkowanie to jest rozumiane jako załadunek programu do pamięci o dostępie swobodnym (RAM) komputera lub zainstalowanie go w pamięci stałej (twardy dysk).
- §4. Program jest własnością Moje Bambino i jest chroniony polskim prawem autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. 2019, poz. 1231). Zabrania się użytkownikowi i osobom trzecim mającym dostęp do programu jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania programu w części lub całości. Zabrania się również kopiowania utworów, materiałów i dokumentacji towarzyszących programowi.
- §5. W zakresie dozwolonym obowiązującym w Polsce prawem, Moje Bambino nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania programu. Moje Bambino nie gwarantuje, że funkcje programu spełniają wymagania i oczekiwania użytkownika lub że jest on kompatybilny z każdym systemem komputerowym.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Instrukcję użytkownika należy przeczytać dokładnie i w całości.
- Stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji użytkownika.
- Instrukcję użytkownika przechowywać w miejscu łatwodostępnym dla wszystkich użytkowników.

## OBJAŚNIENIA SYMBOLI I WSKAZÓWEK

	SYMBOL WYROBU MEDYCZNEGO
	NR PARTII / DATA PRODUKCJI
	KOD WYROBU
	ZNAK ZGODNOŚCI, ŚWIADCZĄCYM O ZASTOSOWANIU I SPEŁNIENIU PRZEZ WYTWÓRCĘ ODPOWIEDNIH WYMAGAŃ ZAWARTYCH W DYREKTYWACH / ROZPORZĄDZENIACH EUROPEJSKICH ORAZ W NORMACH BEZPIECZEŃSTWA POWIĄZANYCH Z WYROBEM.
	PRODUCENT
	SYMBOL ZAWIERA INFORMACJE O ZAGROŻENIU WYPADKIEM LUB OBRAŻENIAMI CIAŁA. ZLEKCEWAŻENIE PODANYCH INFORMACJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWSTANIA SZKODY NA WYROBIE LUB OSOBIE

## PRODUCENT PROGRAMU

Moje Bambino Sp. z o.o.  
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46  
NIP: 725-193-34-48,  
Regon: 100283710,  
BDO: 000017436

## BAMBIKOWE LOGOPRZYGODY JAKO WYRÓB MEDYCZNY

Program Bambikowe Logoprygody jest efektem współpracy informatyków oraz specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz logopedii. Przy realizacji projektu stosowano System Zarządzania Jakością według norm: EN ISO 9001:2015 oraz spełniono wymagania prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR - *Medical Device Regulation*).

## INFORMACJE O PROGRAMIE, PRZEZNACZENIE PROGRAMU, FUNKCJE PROGRAMU

**Program terapeutyczny** skonstruowany jest zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego jest również doskonałym narzędziem do:

- stymulacji wyższych funkcji słuchowych
- w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
- z afazją dziecięcą,
- dysleksją,
- z zaburzeniami słuchu,
- spektrum autyzmu,
- a przede wszystkim z zaburzeniami przetwarzania słuchowego [APD].

Odpowiedni poziom funkcji słuchowych ma wpływ na:

- kształtowanie się prawidłowej artykulacji,
- opanowanie funkcji fonologicznych tj. różnicowania głosek, łączenia ich w wyrazy, ustawiania w odpowiedniej kolejności
- w wyrazie i przekształcania,
- sprawności językowych,
- opanowanie przez dzieci umiejętności czytania i pisanania.

Program multimedialny przygotowany do terapii stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka.

składa się z sześciu części

- usprawnianiem prakcji oralnej
- poprawą spostrzegania i przetwarzania słuchowego dzięki:  
„Różnicowaniu dźwięków niewerbalnych”,  
„Co słyszysz po kolei - pamięć słuchowa wyrazów”  
„Słyszę i rozumiem”  
„Co słycać w wyrazie”  
„Różnicowanie dźwięków mowy”  
„Rytmy”  
„Rymy”
- wymową w oparciu o grupę ćwiczeń mających na celu wspieranie dziecka w pracy nad poprawą artykulacji.
- wzbogacaniem słownictwa
- rozwijaniem kompetencji językowych,

"Warto tu zajrzeć" zawiera podstawowe informacje o warunkach prawidłowego rozwoju mowy, najczęstszych wadach artykulacyjnych oraz dyplomy do wydrukowania.



**UWAGA**

*Podczas korzystania z programu dziecko powinna towarzyszyć osoba dorosła rodzic lub terapeuta, aby wspierać i w razie potrzeby wyjaśniać polecenia lub zmieniać parametry ćwiczeń.*



**UWAGA**

*Tak jak w przypadku każdego treningu słuchowego dzieci z aktywną epilepsją, które chciałyby skorzystać z programu „Bambikowe logoprzygody” powinny skonsultować to z prowadzącym neurologiem.*

#### UŻYTKOWNICY PROGRAMU

Z programu mogą korzystać m.in. wychowawcy, pedagodzy i terapeuci w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i gabinetach terapeutycznych do terapii dzieci od lat 4.

#### W SKŁAD PROGRAMU WCHODZI:

- klucz dostępu - licencja jednostanowiskowa
- słuchawki dwukanałowe
- 70 naklejek
- książeczka postępów dziecka

#### MODUŁY PROGRAMU

Program zawiera następujące moduły:

- usprawnianie prakcji oralnej Uwaga słuchowa
- poprawy spostrzegania i przetwarzania słuchowego Uwaga i pamięć słuchowa
- wymowy w oparciu o grupę ćwiczeń
- wzbogacanie słownictwa
- rozwijanie kompetencji językowych,
- "Warto tu zajrzeć" – zawiera podstawowe informacje o warunkach prawidłowego rozwoju mowy, najczęstszych wadach artykulacyjnych oraz dyplomy do wydrukowania

#### MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

1. Windows XP 32/64-bit + Service Pack 3 + DirectX 9.0c  
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa
2. Windows Vista/7/8 64-bit + DirectX 9.0c  
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 2GB, Video RAM 1GB, karta dźwiękowa
3. Mac OS X 10.7 64-bit  
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa
4. Linux Ubuntu 14.04 z bibliotekami: SDL2, Swscale 2, AVformat 54, AVcodec 54, AVutil 52  
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa.



**UWAGA**

*Użytkowanie programu wymaga dostępu do internetu.*

#### CZYNNOŚCI POZĄTKOWE . INSTALACJA PROGRAMU

Po zakupie użytkownik musi wejść na stronę <https://www.akademiabambika.pl> a następnie kliknąć w „BAMBIKOWE LOGOPRZYGODY” i POBIERZ PROGRAM. Instalacja rozpoczyna się automatycznie po kliknięciu. Ze względu na ograniczenia uprawnień użytkowników systemu Windows, konieczne może okazać się ręczne uruchomienie pliku instalacyjnego poprzez opcję „uruchom jako administrator”.

Proces instalacji wymaga zaakceptowania tekstu licencji (warunków korzystania z programu) oraz podania danych rejestrowych użytkownika.

Na początku instalacji należy wpisać numery seryjne zakupionych modułów, widoczne na dostarczonej produkcie

Strona 3 z 4



## URUCHOMIENIE PROGRAMU

Bambikowe logoprzygody można uruchomić poprzez skrót (ikonę) programu (smok) umieszczony na Pulpicie lub korzystając z Menu Start.

## BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z PROGRAMU

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z programem zawierają się w ogólnych zasadach korzystania z komputerów, monitorów oraz urządzeń peryferyjnych i są określane przez producentów używanego sprzętu.

Szczególą, ale niewyłączną, uwagę należy zwrócić na monitory, które mogą wymagać zachowania większej odległości lub ograniczenia czasu pracy, a przy wybranych parametrach technicznych mogą oddziaływać negatywnie poprzez fotostymulację na osoby ze schorzeniami neurologicznymi np. epilepsją.

Należy również zachować ostrożność w odniesieniu do głośników lub słuchawek, które w przypadku nieprawidłowego ustawienia głośności na poziomie sprzętowym lub systemu operacyjnego mogą wyemitować dźwięk o zbyt dużym natężeniu, co jest niekontrolowane przez program Bambikowe logoprzygody, a może wpłynąć negatywnie na słuch użytkownika.



**UWAGA**

***Słuchawki nie są zabawką!***

***Z uwagi na ryzyko uduszenia przewodem zasilającym słuchawki, należy zachować ostrożność i użytkować produkt wyłącznie w obecności i pod nadzorem osoby dorosłej.***

***Każdorazowo przed użyciem słuchawek należy dostosować głośność do potrzeb użytkownika. Zbyt głośne i/lub długotrwałe użytkowanie słuchawek może powodować trwałe uszkodzenie słuchu.***

## INFORMACJE DODATKOWE



**UWAGA**

***W przypadku wystąpienia zdarzenia z udziałem niniejszego wyrobu medycznego na terenie Polski, które bezpośrednio lub pośrednio spowodowało:***

- zgon pacjenta, użytkownika lub innej osoby,***
- czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby,***
- poważne zagrożenie zdrowia publicznego***

***należy niezwłocznie powiadomić o jego wystąpieniu producenta oraz organ nadzorujący rynek wyrobów medycznych, korzystając z następujących danych kontaktowych:***

PRODUCENT	ORGAN NADZORUJĄCY
MOJE BAMBINO Spółka z o.o.	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa
fax 42 630 04 80 tel. 42 630 01 30 e-mail: <a href="mailto:biuro@mojebambino.pl">biuro@mojebambino.pl</a>	fax 22 492 11 29 centrala: 22 492 11 00 <a href="mailto:incydenty@urpl.gov.pl">incydenty@urpl.gov.pl</a>

